


Triple Feces Test[®] (TFT) voor onderzoek op darmparasieten

Afname instructies

Hoe dient het potje gevuld te worden?

The diagram illustrates the correct procedure for filling the Triple Feces Test (TFT) pot. It shows three stages: 1. An empty pot with a red arrow indicating the fill level. 2. The pot being filled with stool and clear liquid up to the red arrow. 3. The pot being sealed and shaken. A warning symbol indicates that the contents are poisonous. A red 'X' is placed over a pot that is overfilled with stool. The final step shows the pot being placed in its packaging with an absorbent pad.

Gifftig / poison 

Aanvullen met Ontlasting
saf vloeistof

teveel ontlasting

20 seconden krachtig schudden

absorptievelletje

- Het potje tot aan de rode pijl vullen met ontlasting. Na het vullen het deksel stevig dichtdraaien en daarna het **potje krachtig schudden gedurende 20 seconden**.
- Potje omwickelen met absorptievelletje en terug plaatsen in verpakking.

Afname:

Op 3 achtereenvolgende dagen, direct na de ontlasting, het potje vullen met ontlasting.

Dag 1 Potje nummer 1 (**met vloeistof**): vullen tot aan de rode pijl.

Dag 2 Potje nummer 2 (**zonder vloeistof**): vullen tot aan de rode pijl, hierna in de koelkast bewaren.

Dag 3 Potje nummer 3 (**met vloeistof**): vullen tot aan de rode pijl.

- Indien bij de ontlasting bloed en/of slijm wordt gezien, dit tevens meezenden, omdat ook hierin parasieten kunnen zitten.
- Indien bij de ontlasting wormen of delen van wormen worden gezien, deze in potje 2 inleveren en dit a.u.b. vermelden op het inzendformulier.
- Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert dan slechts 1 keer per dag een potje vullen. Indien u niet dagelijks ontlasting produceert dan pas insturen indien u de 3 potjes heeft kunnen vullen.

Verzenden:

- Noteer op **elk potje** uw naam, geboortedatum en de afnamedatum.
- Direct na het vullen van het derde potje het totale pakket tezamen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk bij het afhaalpunt (vraag uw behandelaar) of laboratorium afgeven.

Opmerkingen:

- **Voorkom dat kinderen de vloeistof gaan drinken!!!**
- De gebruikte vloeistof is niet drinkbaar. Indien er toch van gedronken is dan minstens 2 bekertjes melk drinken en de huisarts waarschuwen.
- Huidcontact is niet schadelijk (gewoon met water afspoelen).
- De vloeistof bevat 1,5% Natriumacetaat + 2,0% Azijnzuur + 1,5% Formaldehyde.